

ISTRUZIONI D'USO

Step 1:

Selezionare la misura di ACTIVA desiderata;

Step 2:


Prendere ACTIVA con un qualsiasi strumento.

Con un direzionatore comprimere la molla da uno dei due lati;

Step 3:

Inserire ACTIVA sulla parte di arco scoperto dalla molla e crimpare dolcemente.

Quindi lasciare la molla.

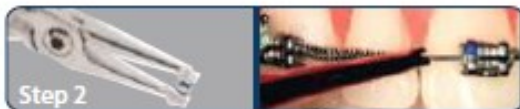

DIRECTIONS FOR USE

Step 1:

Choose the correct size of ACTIVA is needed;

Step 2:

Grasp ACTIVA using any plier.

With an elastic ligature director compress the spring to one side

Step 3:

Insert ACTIVA on the archwire and crimp it gently.

Release the spring.

